



GC Tooth Mousse et MI Paste Plus,

les soins préventifs dentaires les plus avancés...

GC Tooth Mousse et MI Paste Plus apportent une réelle contribution à la protection - si fragile - de l'environnement buccal dans les nombreux cas de déséquilibre de la balance minérale. Ils participent à la reformation des cristaux d'apatite.

Ils renforcent, protègent et rechargent l'émail dentaire en danger.

Comment les utiliser ?

Dans le cadre d'un plan de traitement à la maison : application directe avec le doigt ou avec une brosette. Etaler la pâte en passant doucement la langue sur les dents. Après 2 à 5 minutes en bouche, cracher soigneusement sans rincer. Les excédents de Tooth Mousse se dissoudront rapidement. Il est recommandé de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

Dans tous les cas, plus ils sont gardés en bouche plus le résultat est efficace.

GC Tooth Mousse et MI Paste Plus peuvent être utilisés par tous, de l'enfant à la personne âgée... sans risque à l'ingestion ni de surdosage

Les indications sont multiples : cas de sensibilité dentaire - blanchiment - orthodontie - amélioration de l'esthétique - érosion - xérostomie - géiatrie - hypominéralisation - fluorose légère - allergie au fluor - bouche sèche - **et**, pour une amélioration immédiate de la qualité de vie suite à un traitement d'irradiation, les buveurs réguliers de vin...

C'est quand elle vient à manquer que l'on mesure toute l'importance de la salive

La salive joue plusieurs rôles essentiels. Elle lubrifie le tissu oral, aide à la digestion, sensibilise au goût, maintient la muqueuse saine et facilite la reminéralisation des dents.

Une salivation réduite = une qualité de vie réduite

Nouveau... **GC Dry Mouth Gel**, le gel qui apporte un soulagement immédiat, un confort durable et apaisant aux "bouches sèches".

Comment l'utiliser ?

Dry Mouth Gel est un produit unique, sans sucre, qui peut être utilisé n'importe où, n'importe quand dès que cela est nécessaire. Il suffit d'appliquer une quantité généreuse de gel avec le doigt propre sur toutes les surfaces des dents et sur les muqueuses. Ses 4 parfums plaisants laissent une sensation fraîche et agréable en bouche sans irritation ni brûlure. Dry Mouth Gel au pH neutre se traduit par un soulagement symptomatique efficace tout en préservant le pH en bouche à un niveau de sécurité évitant la déminéralisation.

Les indications sont multiples : Respiration nocturne par la bouche - Bouche sèche suite à une prescription médicale - Syndrome de Sjögren - Radiothérapie - Maladies chroniques pouvant altérer le flux salivaire comme le diabète, hépatite C chronique et maladies auto-immunes du tissu conjonctif tels que le lupus érythémateux disséminé - Les porteurs de prothèses dentaire pour la protection et la lubrification du tissu.



Où se les procurer ?



GC Tooth Mousse MI Paste Plus Dry Mouth Gel

sont disponibles sur recommandation sur le site

www.drymouth.fr

38 rue du château d'eau 85 280 La Ferrière

Tél : 02 28 15 53 92



Recaldent est une marque de fabrication utilisée sous licence par Recaldent Pty. limited. Recaldent CPP-ACP est un produit sans lactose dérivé des protéines de lait de vache et ne doit pas être utilisé chez les patients présentant des risques d'allergies aux protéines de lait de vache et aux hydroxybenzoates. *ACPF = ACP + fluorures

